


Filter

Pocketmasken ska vara ihoptryckt när filter tas bort eller sätts in.

Borttagning

- Håll masken med ena handen och filterhylsan mellan andra handens tumme och två fingrar. Drag filteret från masken.

- Kassera det använda filteret.

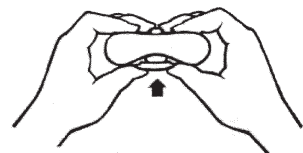

Insättning

Tryck fast det nya filtret ordentligt på munstyckets insida som figuren visar.

OBS!

Tryck in filtret så långt att det tätar emot maskens kupol.

Observera: Laerdal Pocketmask kan även användas utan filter.

Rengöring

Pocketmasken är lätt att göra ren och är återanvändningsbar. Envägsventilen kan göras ren för återanvändning vid övning på docka, men skall kasseras efter användning på patient. Filtret skall alltid kasseras efter varje användningstillfälle.


Tvätta och borsta i varmt såpvatten. Skölj i rent vatten. Låt masken under 10 minuter ligga i en desinfektionslösning (Klorin[®] hushållsklorin 1,5 cl = 1 matsked till 1 liter vatten). Skölj därefter noga igen i varmt vatten och låt masken torka.

Får inte desinficeras genom pastörisering, koking, gassterilisering eller autoklavering. Observera:


Om masken blir klibbig ska den rengöras enligt ovan.

Förvaring

Förevara som figuren visar.

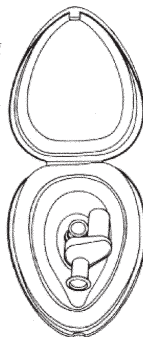

Tekniska specifikationer

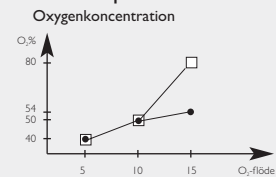

- Inhalation av patient som andas spontant
- Ventilation av patient utan spontan andning

Temperatur gränser

Användning: - 10°C till 40°C

Lagring: - 40°C till 50°C



Expirationsmotstånd för patienten

Mask med envägsventil; 2,9 cm H₂O
Mask med filter och envägsventil; 5,2 cm H₂O

Inspirationsmotstånd för patienten

Mask med envägsventil; 2,4 cm H₂O
Mask med filter och envägsventil; 4,7 cm H₂O

Mätningarna ovan anger endast nominella värden.

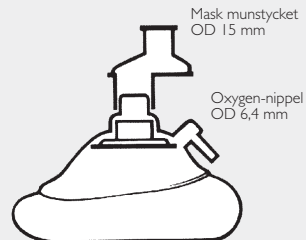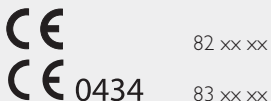

Modeller

- | | |
|----------|--|
| 82 00 11 | Pocketmask med envägsventil och filter |
| 82 00 03 | Pocketmask med envägsventil |
| 83 00 11 | Pocketmask med envägsventil, filter, nackband & oxygennippel |
| 83 00 03 | Pocketmask med envägsventil, nackband & oxygennippel |

Delar


- | | |
|----------|---------------------------|
| 82 06 00 | Filter, 10 st/förp. |
| 82 04 00 | Envägsventil, 10 st/förp. |
| 83 03 00 | Bruksanvisning |

Pocketmask i ask:

Mått: 13 x 11 x 4 cm

Vikt: 110 g

Pocket Mask

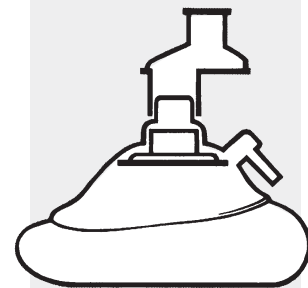

Bruksanvisning

Manufactured in China for:

LAERDAL MEDICAL AS, Norway
P.O. Box 377, N-4002 Stavanger
Tel. +47 51 51 17 00
Fax +47 51 52 35 57



Laerdal

helping save lives

www.laerdal.com


Användning

Laerdals Pocketmask är i första hand avsedd att användas för mun-till-mask inblåsning på vuxen person, barn eller spädbarn med andningsstopp. Pocketmasken ska endast användas av personer som enhälligt adekvat utbildning för detta.

Annan ventilationsutrustning, som t. ex. manuell andningsballong eller oxygenansluten andningsballong, kan kopplas till Pocketmaskens munstycke (utan envägsventil påsatt) med OD 15 mm anslutning.


Ytterligare exemplar av denna Bruksanvisning kan rekvideras separat.

Funtion

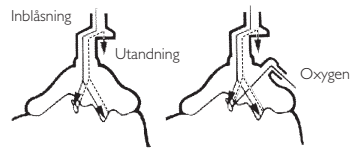


Figurena visar hur Pocketmasken fungerar vid olika användningssätt.

Bruk på vuxen och barn

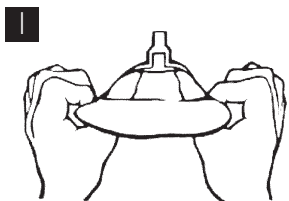

Kontrollera att filtret (om det ingår) är tryckt ordentligt på plats och tryck ut kupolen.

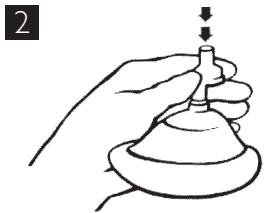


Sätt fast envägsventil över Pocketmaskens munstycke. Vrid ventilen så att utandningsluft leds bort från räddaren.

3 Observera: Steg 3-5 gäller endast vid bruk på vuxen och barn.




Placera först Pocketmaskens luftfyllda cuff mellan patientens underläpp och haka så att underläppen trycks ned och munnen hålles öppen under masken. Placera Pocketmaskens spetsiga ände märkt "nose" över patientens näsa.

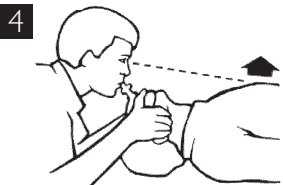

Tryck Pocketmasken tätt mot patientens ansikte med tummarna som figuren visar. Öppna luftvägen. Blås långsamt till dess att bröstkorgen höjer seg.

5

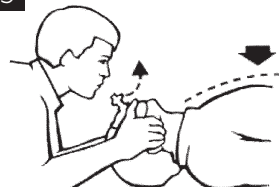

Avlägsna munnen från munstycket och låt patienten andas ut.

Observera: Om patienten får uppkastningar ska masken avlägsnas och patientens luftvägar rensas. Rengör masken genom att skaka bort främmande föremål. Blås igenom envägsventilen för att kontrollera funktionen. Placera åter masken över patientens ansikte och fortsätt inblåsningarna.


Bruk på spädbarn




Följ anvisningarna för vuxen och barn men vänd Pocketmasken så att änden märkt "nose" ligger under hakan.

Placera därefter masken över ansiktet. Blås långsamt till dess att bröstkorgen höjer seg. Avlägsna sedan munnen från munstycket och låt spädbarnet andas ut.

Bruk med oxygen

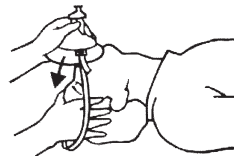

Nackband (om det ingår) – Håller masken på plats vid oxygentillförsel till patient som spontanandas samt underlättar HLR.

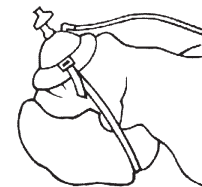

Extra oxygen – Anslut oxygenslangen till pocketmaskens oxygennippel. Välj oxygenflöde (se oxygenkoncentrations-tabell). Ventilera om nödvändigt.