

## 1. がん

- 疾患名：慢性骨髄性白血病
- アウトライン：

「48 歳男性。体温 37.3°C。脈拍 84/分、整。血圧 136/76mmHg。左季肋下に脾臓を 3cm 触知する。疲労感と倦怠感あり。微熱、左上腹部膨満感も認められ、検査後、慢性骨髄性白血病と診断。イマチニブで薬物治療開始。6 か月後、間質性肺炎で捻髪音（音）と下痢の確認後、ステロイドパルス療法開始。疲労感もあり。さらに 2 か月後、正常に生活ができるようになった。」
- LLEAP 情報：
  - ✓ 受講者への概要：48 歳男性。慢性骨髄性白血病と診断され、抗癌剤を使用した薬物療法開始。副作用の確認とその後の治療における薬効の確認を行う。
  - ✓ 学習目標：全身観察や異常な聴診音について理解する。
  - ✓ 名前：宮崎 太郎（みやざき たろう）
  - ✓ 身長：167 cm
  - ✓ 体重：68 kg



(処方)

グリバック錠 100 mg <sup>(注1)</sup> 1 回 4 錠 (1 日 4 錠)  
1 日 1 回 朝食後 7 日分  
(注1: イマチニブメシル酸塩錠 100 mg を含む錠剤)

(処方)

ソル・メドロール静注用 1000 mg <sup>(注2)</sup> 1 日 1 回  
3 日間 点滴静注  
(注2: メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 1000 mg を含む注射製剤)

● 高機能患者シミュレータ SimMan 3G への詳細なプログラム設定の内訳

	A	B	C
心音 A	標準 90	標準 90	標準 90
P	標準 90	標準 90	標準 90
T	標準 90	標準 90	標準 90
M	標準 90	標準 90	標準 90
前肺音右上	標準 20	捻髪音 60	標準 20
右中	標準 0	捻髪音 60	標準 0
右下	標準 0	捻髪音 60	標準 0
左上	標準 20	捻髪音 60	標準 20
左下	標準 0	捻髪音 60	標準 0
後肺音右上	標準 20	捻髪音 60	標準 20
右下	標準 0	捻髪音 60	標準 0
左上	標準 20	捻髪音 60	標準 20
左下	標準 0	捻髪音 60	標準 0
腸音	標準 50	亢進 50	標準 50
心電図	洞調律	洞調律	洞調律
脈拍(/min)	84 整	88 整	78 整
血圧(mmHg)	136/76	132/72	128/66
呼吸数(/min)	16	22	16
SpO <sub>2</sub> (%)	98	92	99
体温(°C)	37.3	38.8	36.8
声 (膨満・疲労感：うー)	○	○	
声 (咳)		○ : 10 秒	

心音、肺音、腸音の数値は、スピーカーから流れる音量 (%) を示している。